

# 防災用ストレッチャー

## ～【Bストコン】AD-010115B～

### 取扱説明書



#### <もくじ>

- P1 ～ご使用前に～
- P2 ～点検・お手入れ・保管～
- P3 ～素材と仕様～
- P4 ～組み立て方①～
- P5 ～組み立て方②～
- P6 ～畳方・外し方①～
- P7 ～畳方・外し方②～
- P8 ～安全ベルト取付方～








搬送器具福祉関連機器

# ご使用前に

この度は、防災用ストレッチャー「AD-010115B」(以下;Bストコン)をお買い上げ頂き、誠にありがとうございます。安全にご使用いただく為に、この説明書をよくお読み頂き、正しくご使用ください。  
この後、必要な時にすぐお読みいただける様に、大切に保管してください。

本文中の図記号表示の意味、内容は以下の通りです。



	警告・・・ 人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容
	注意・・・ 人が傷害を負う可能性及び物的損害の発生が想定される内容
図記号の意味	
	「警告」や「注意」を要す事項を表します。
	「禁止」を表します。
	「必ずして守ってほしい行為」を表します。

## 【警告】

- 移動時には必ず安全ベルト(2ヶ所)をして下さい。
- 耐荷重120kgを超える方は使用しないでください。
- フレーム等に巻き込まれない服装で使用しないでください。
- 使用している間、介護者は介護される方から目を離さないでください。
- 人を乗せて手押し移動のストレッチャー以外には使用しないでください。
- 本機を組み立ての際、必ず金具が固定されていることをご確認後、ご使用して下さい。
- 壊れた状態、不具合を感じた時は、速やかに使用をおやめいただき、すぐに販売店にご連絡を下さい。
- 改造はしないでください。
- 本機へ介護者を乗せ降ろしの場合は必ずキャスターのロックをして固定して下さい。
- ストレッチャーに人を乗せる場合は、マットレス前後中央から等分に体重が分散するように乗せて下さい。  
片側に体重がかかるような乗せ方で移動するとバランスを崩し転倒・転落の原因となります。

## 【注意】

- 階段・段差・溝・長い昇り降り坂での使用は危険です。
- シャワーストレッチャーではありません。湯水などを掛けないでください。
- エレベーターを使用する際、ドアの隙間に車輪が落としこまないか確認をして下さい。

-  ベッドなどから移乗またはベッドへの移乗は、必ず2名以上で行って下さい。
-  降ろするときは人の手や物が挟まっていないか確認の上必ず降ろして下さい。

# 点検・お手入れ・保管



## <使用前の点検>

- 1:担架固定用ピンに異常はないか確認
- 2:キャスターに異常がないか確認
- 3:キャスターのロックがスムーズに行えるか確認



異常が見られた場合は、使用を中止し、すぐに販売店までご連絡をお願い致します。

## <お手入れ>

マットレス・枕は水またはお湯で、汚れがひどい場合は中性洗剤をご使用ください。

洗浄後は十分に乾燥させてからご使用下さい。

※注意:シンナー・ベンジン・アルコール類は使用しないでください。



## 点検・整備・清掃して下さい。

ボルト・ナットの緩み・フレームのゆがみ・ガタつきなどの点検を緩みがあれば締めて下さい。

泥やほこりなどは、ぬれた布でふき取って下さい。あと乾いた布でふき、可動部分に潤滑油として

いただければ長くご使用いただけます。潤滑油(5-56)等を赤丸印に



## <保管>

保管場所は室内で高温多湿でない直射日光が当たらない場所で保管をお願い致します。

折り畳んで立てて保管する場合は、倒れないように保管して下さい。

※倒れてケガ、損傷する場合があります。

●保証書……保証期間は1年間です。大切に保管をお願い致します。(別紙)


●アフターサービス……万が一故障・不具合などがございましたら、お買い上げいただいた販売店まで恐れ入りますがご連絡ください。

# 各部の名称と材質・仕様

## <担架の各部の名称>



## <トランスポーターの各部の名称>

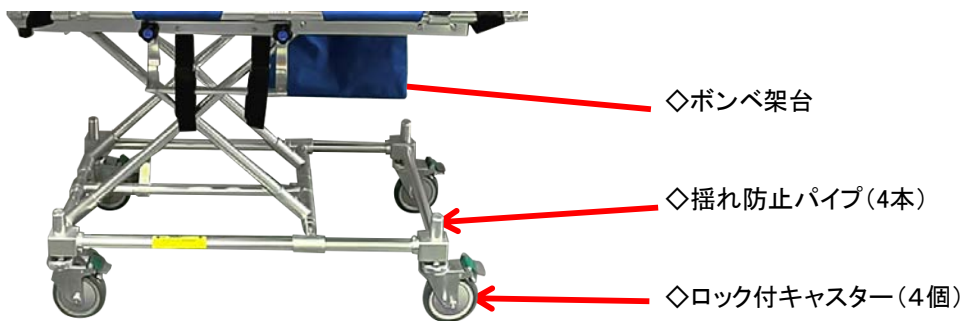

## <各部の材質・仕様>

品番	AD-010115B
材質	フレーム部／アルミニウム合金
	マット・枕／ポリエステル
	クッション／ウレタン
	安全ベルト／PP・ポリエステル
	キャスター／PP・PU系樹脂 (125mmφ)
重量	担架：約5.3Kg・トランスポーター約21.7Kg
サイズ：収納時	1020mmX550mmX300mm(マットレス・揺れ防止パイプ含まず)
サイズ：使用時	最高：1820mmX550mmX780mm(マットレス含む)
	最低：1820mmX550mmX390mm(マットレス・揺れ防止パイプ含む)
耐荷重	約120kg

# 組み立て方①

## <キャスター>

①梱包時はキャスターは取付ています。





②キャスターは4ヶ所の穴にキャスターを締めていきます。



\* キャスターはロック状態にしてください。

③キャスターのネジが出てきたら揺れ防止パイプで締めてください。

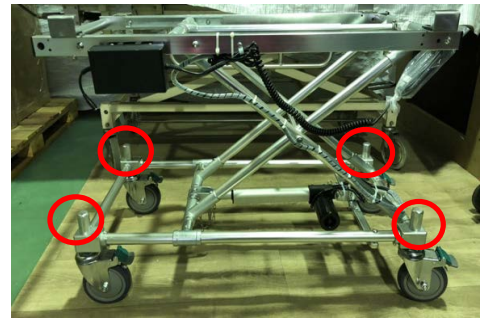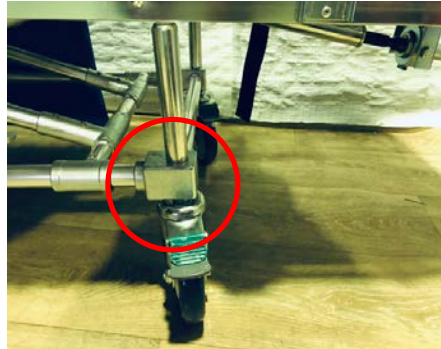

(写真のキャスターはまだ締めていません)

(パイプ15cm使用)

(パイプ5cm使用)

④担架をトランスポーターにセットする




L字型



コの字型


担架をコの字型にはめ込んでからL字型に置く

⑤担架を置いたら落下防止ピンで固定する

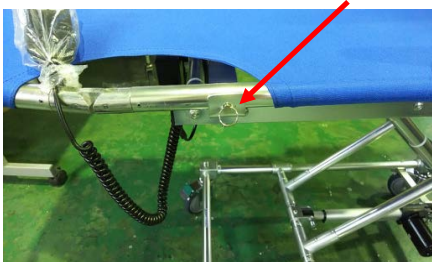

足側

(エストコン写真使用)

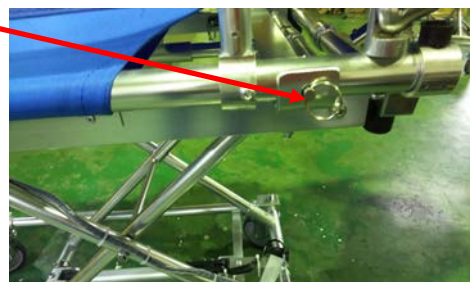


頭側

(エストコン写真使用)



## 組み立て方②

⑥ 頭側は赤いレバーを握って広げます。足側もひろげます。

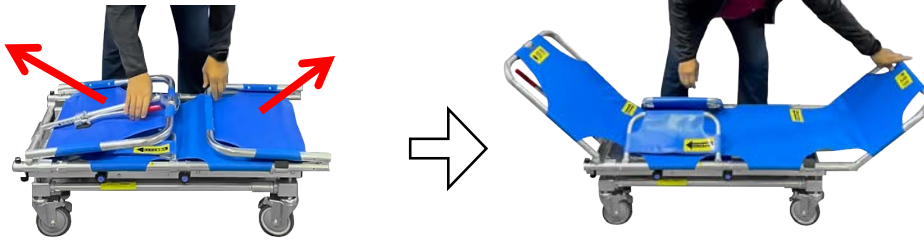

⑦ サイドレールを起こします。




⑧ 上へ引き上げます。



⑨ 必要に応じて点滴簿・酸素ポンベ架台をセット。それぞれネジで固定。



点滴棒はトランスポート下段ありま 架台を取り付けます。 点滴棒を架台に差し込み適度な高さに合わせネジで固定す

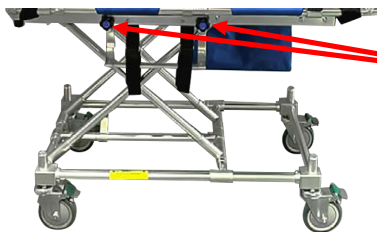

ポンベ架台は2箇所のネジで締めます。



下段380mm(但し揺れ防止パイプ50mmついた状態)



上段780mmマットレスまで

# 畳み方・外し方①

①点滴棒はずします。

②酸素ボンベ架台の外し方




ネジをはずします。(2ヶ所)  
酸素ボンベ留めるマジックテープ(2本)

③マットレス・枕をはずします。



④サイドレールのたたみ方

サイドレールを矢印←の  
方向へ引きます。

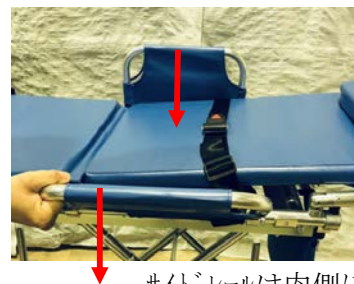

サイドレールは内側にも  
外側にも倒せます。

⑤背上げ・足側(担架)をそれぞれ中央に畳みます。



## 畳み方・外し方②

⑤担架を下げる時はフックレバーを引きます。

**注意: 必ず担架を持ちながらゆっくり下げてください。手を挟む可能性があります。**



**注意: 下げる時は必ずポンベ架台を外してください。ポンベ架台が変形します。**



⑥収納時は付属の防災カバーに入れて保管ください、\* 青い結束ベルトで固定してから収納ください。




マットレス・枕・小物関係は入りません。

\* 担架とトランスポートを分ける時

①落下防止ピンをはずし、担架をそのまま少し持ち上げ浮かせます。(L字型側)

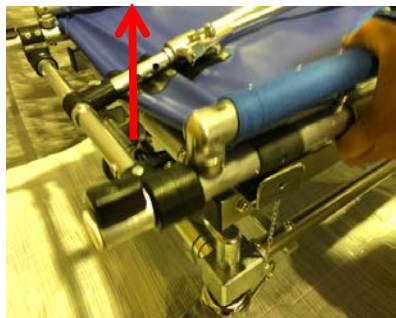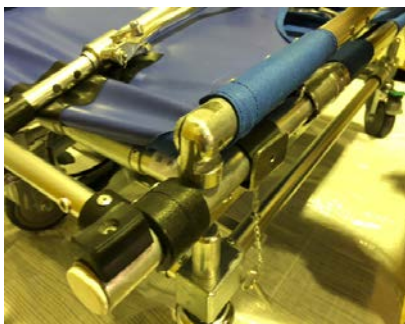

右側

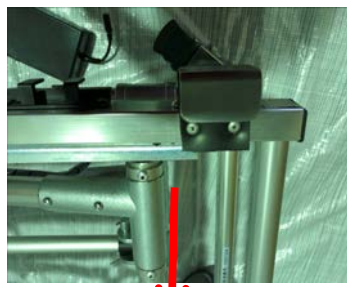

左側

②次にコの字型側を抜きます。



## ★安全ベルトの取付方

(旧型ベルト使用)



- ① ストレチャーのパイプの裏側にベルト通す。(1本目)



- ② 片方の輪にもう片方(金具等側)をくぐらせる。



- ③ 最後まで金具側を引っ張りパイプに固定する。



- ④ 2本目は反対側のパイプに①から③の手順で同じように取付ける。
- ⑤ セットするときには金具を赤い側の穴に差し込む。締め具合の調整は金具側のベルトで調整する。はずす時は赤いところを押すとはずれます。

☆組み立て方はYouTubeで紹介



〒581-0052 大阪府八尾市竹濑1-222-5  
メンテナンス・修理：合同会社介護タクシー・アド  
TEL:06-6773-9945 FAX:06-6773-9944



搬送器具福祉関連機器・製造販売

**株式会社 アド**

使いやすさと心地よさを追求した福祉関連機器の製造し販売しています。